

# JOLLY STANDARD

RICONOSCIUTO DAL SISTEMA  
SANITARIO NAZIONALE

Nomenclatore Tariffario delle  
Protesi: cod. ISO 18.30.12.003



PRODOTTO  
IN ITALIA



OLTRE  
30000  
UNITÀ  
VENDUTE



Reg. n. 6130  
UNI EN ISO 9001:2008

**TGR**<sup>®</sup>  
Strumenti  
di Libertà

# JOLLY STANDARD



LASCIATI CONQUISTARE DA **SICUREZZA, PRATICITÀ E MANEGGEVOLEZZA!**

**Jolly** è lo strumento ideale per il superamento delle barriere architettoniche.  
**Immediato ed intuitivo, è facile da guidare.**

**TGR**: il **made in Italy** che da oltre **30 anni** progetta, realizza e brevetta soluzioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

**Jolly** è il prodotto di punta della gamma TGR, è un **montascale mobile a cingoli**, semplice e funzionale. Dotato di trazione elettrica, si contraddistingue per l'estrema versatilità, la compattezza, l'elevata manovrabilità e una lunga autonomia operativa.


Con un'ampia serie di **accessori ed agganci regolabili**, offre la possibilità di soddisfare le più svariate esigenze.

Queste le peculiarità che rendono **Jolly** idoneo al trasporto su scala di una vastissima gamma di carrozzine.

Grazie agli accorgimenti tecnici adottati è di **semplice utilizzo** e facilmente manovrabile dall'accompagnatore.

**TGR**, sempre attenta alle **esigenze del cliente**, mette a disposizione tutta la propria esperienza offrendo i seguenti **servizi**:

- **Sopralluogo dimostrativo senza impegno** e relativa consulenza finalizzata ad una scelta consapevole dell'ausilio più adatto alle specifiche esigenze.
- **Educazione all'uso gratuita** presso il luogo di utilizzo.
- **Servizio di assistenza tecnica post-vendita** presso centri autorizzati T.G.R. presenti sul territorio nazionale.

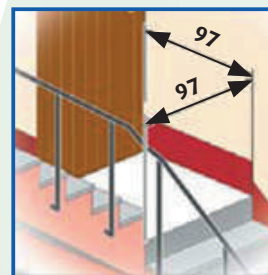

Spazio minimo di manovra su pianerottolo **97x97 cm**



## PEDALIERA POSTERIORE

DISPOSITIVO BREVETTATO\*

**SU RICHIESTA**



TGR, che da sempre è attenta alla sua clientela, ha pensato di dotare i montascale **Jolly** di una **pedaliera** posteriore che **agevola** l'accompagnatore nelle operazioni di carico e scarico della carrozzina.

**Caricare la carrozzina è meno faticoso!**

## PULSANTE SBLOCCO FRENO

DISPOSITIVO BREVETTATO\*\*

In caso di anomalia durante l'utilizzo sulla scala, grazie al pulsante di sblocco del freno è possibile scendere a velocità ridotta e controllata fino al **pianerottolo** o fino al raggiungimento del punto di massima stabilità.

Questo dispositivo di sicurezza, posto comodamente sul manubrio è attivabile direttamente dall'accompagnatore senza necessità di allontanarsi dalla posizione di guida.



**Massima sicurezza per accompagnatore e trasportato!**

DISPOSITIVI FORNITI DI SERIE SU TUTTA LA GAMMA


\* Brevetto n. 1299833

\*\* Brevetto n. 256113

# JOLLY MODELLI SPECIALI

CON RAMPE

BREVETTATI\*

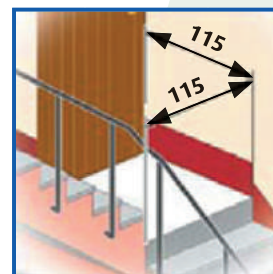

Spazio minimo di manovra  
su pianerottolo 115x115 cm

Per risolvere molteplici problematiche sono stati realizzati diversi modelli che consentono alla gamma **Jolly** di soddisfare con successo le più svariate esigenze.

L'ampia varietà di modelli speciali consente infatti il trasporto su scala di: **carrozine elettroniche**, carrozzine con **schienale basculante** o schienale mobile ed anche di **passeggini**.

Il **Jolly Ramp** è il più versatile tra i nostri modelli speciali.

A seconda del modello spazio minimo di manovra su pianerottolo da: **105x105 cm**.

\* Brevetto n. 260613

**Smontabile** e facilmente  
**Trasportabile.**

Non necessita di attrezzature per essere smontato in due parti e comodamente riposto in **auto**.



Salvaguardia per la tua  
**sicurezza.**

**Interruttore a chiave** per assicurare l'utilizzo da parte delle sole **persone autorizzate.**

Montascale **compatto**, tutto integrato: basta accessori sparsi per la casa!



**Caricabatteria** elettronico **incorporato** e fusibile a vista.



Oltre la sicurezza anche **rispetto** per la tua abitazione.

Cingoli e ruote in gomma **antisdrucchio** ed **antitraccia.**

Il percorso lungo le scale è una fase delicata e per questo **TGR** ha anche predisposto:

- **Doppio dispositivo di sicurezza** (meccanico ed elettrico) che preclude sia l'avvio del montascale a dispositivo non inserito, sia la possibilità di sgancio del timone a macchina in funzione.
- **Dispositivo automatico** di inserimento del **freno**.
- **Dispositivo di sicurezza brevettato\***, che interviene in caso di anomalia bloccando automaticamente il mezzo.

## SPECIFICHE TECNICHE

- Portata massima: **130 kg** versione standard
- Portata massima: **150 kg** versione rinforzata e modelli speciali
- Autonomia di salita: **50 piani** con massimo peso trasportabile
- Autonomia con indicatore di batteria in riserva: **3 piani**
- Inclinazione superabile: fino a **35°** pari al **70%** di pendenza
- Altezza massima del gradino: **18 cm**
- Garanzia: **24 mesi**



TGR si riserva, nell'evoluzione tecnica dei suoi prodotti, di modificare gli articoli illustrati. Le immagini ed i dati riportati potranno quindi subire variazioni.

*NB: Nell'uso seguire attentamente ed attenersi scrupolosamente alle prescrizioni, istruzioni ed avvertenze riportate sul libretto di uso e manutenzione.*

\* Brevetto n. 256113

# AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI FISCALI\*

Il montascale **Jolly** rientra nelle seguenti forme di agevolazione fiscale:

- **Contributo statale** per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati (Legge 13 del 1989)
- **Detrazione IRPEF** pari al 19% per spese sanitarie
- **IVA agevolata**, aliquota al 4%

**Contributi regionali:** oltre ai benefici previsti dalla normativa nazionale, per l'eliminazione delle barriere architettoniche alcune regioni prevedono contributi per l'acquisto di ausili per disabili erogati direttamente con proprie disposizioni.

**Cumulabilità contributi statali e agevolazioni IRPEF:** i contributi sono cumulabili purchè l'erogazione complessiva (pari alla somma del contributo legge 13/89 e delle detrazioni IRPEF non superi la spesa effettivamente sostenuta).



**TGR Srl**

Via Lombardia n.12  
40064 Ozzano Emilia (BO) - ITALIA  
tel. (+39) 051 65 23 511  
fax. (+39) 051 79 82 38  
mail. [tgr@tgr.it](mailto:tgr@tgr.it)

**[www.tgr.it](http://www.tgr.it)**

\* I dati riportati si basano sulle norme legislative relative al trattamento fiscale delle detrazioni d'imposta. Nel caso intervengano modifiche alla normativa vigente, si consiglia di verificare che non siano occorse variazioni nel trattamento fiscale. Suggeriamo comunque, al fine di verificare l'applicabilità di tali norme alle specifiche condizioni di ogni contribuente, di rivolgersi ad un consulente fiscale.